



PRRD-3

RESPIRADOR N95 DESECHABLE DYNAMIC BOX 20 UND

Caja de 20 unidades de respiradores desechables. Cada respirador ofrece protección básica contra polvo, nieblas y humos. Ideal para uso ocasional o aplicaciones de baja exigencia. Aprobado por NIOSH como N95 para su uso en ambientes sin aceites.

CARACTERÍSTICAS

- Almohadilla nasal de espuma de celda abierta que proporciona un cojín entre la nariz y la mascarilla para mayor comodidad.
- Clip nasal que ayuda a moldear la mascarilla a la forma de la nariz del usuario para un sellado más seguro.
- Libre de látex y sin alérgenos comunes, para mayor tranquilidad del usuario.
- **Protección: N95** - Filtro de partículas (nivel de eficiencia de filtrado del 95%) efectivo contra aerosoles particulados libres de aceite; pueden aplicarse restricciones de tiempo de uso.
- Color blanco.
- Se vende por caja de 20 unidades.


CERTIFICACIÓN NIOSH N95





INSTRUCCIONES PARA PONERSE EL RESPIRADOR

- 1 Sujete el respirador en la mano, con la franja de ajuste de metal hacia el lado opuesto suyo, permitiendo que las bandas para la cabeza cuelguen por debajo de sus manos.
- 2 Apriete el respirador firmemente contra su cara con el extremo angosto sobre el puente de su nariz.
- 3 Pase la correa superior sobre su cabeza y colóquesela arriba sobre la parte trasera de su cabeza. Pase la correa inferior sobre su cabeza y colóquesela debajo de las orejas.
- 4 Usando ambas manos, moldeee la franja de metal en la forma de su nariz.
- 5 Revise el ajuste ahuecando ambas manos sobre el respirador e inhalando fuertemente. Se debe detectar una presión negativa adentro de la máscara. Si hay fuga de aire alrededor de su nariz, vuelva a darle forma a la franja de metal. Si hay fuga de aire alrededor de los bordes, vuelva a colocar las correas. Repita este procedimiento según sea necesario, hasta que no se detecten fugas de aire y se haya obtenido un ajuste satisfactorio. Si no puede lograr un buen sellado de la máscara a la cara, no entre al área contaminada y consulte a su supervisor.

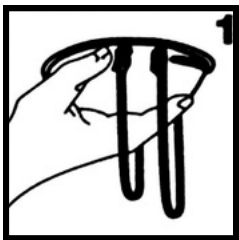

LIMITACIONES DEL TIEMPO DE USO

El uso repetido de este respirador depende de la higiene, los daños y el aumento de la resistencia a respirar. En los lugares de trabajo muy polvorientos, el tiempo de servicio no debe extenderse más allá de 8 horas de uso total.



ETIQUETA DE APROBACIÓN DE NIOSH



Ce respirateur n'est homologué que dans la configuration suivante: / Este respirador ha sido aprobado solamente en la configuración siguiente:			
TC	Protection ¹ / Protección ¹	Respirateur / Respirador	Conseils de prudence et limitations ² / Precauciones y Limitaciones ²
84A-7872		RPD513N95	ABCJMNOPS
	N95	X	

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- A** - No se debe usar en atmósferas que contengan menos de 19.5% de oxígeno.
 - B** - No se debe usar en atmósferas que sean inmediatamente peligrosas para la vida o la salud.
 - C** - No exceda las concentraciones de uso máximas establecidas por los estándares reglamentarios.
 - J** - El mal uso y mal mantenimiento de este producto pueden traer como consecuencia lesiones graves o hasta la muerte.
 - M** - Todos los respiradores aprobados se deben seleccionar, ajustar, usar y mantener de acuerdo con las regulaciones de MSHA, OSHA y otras regulaciones aplicables.
 - N** - Nunca substituya, modifique, añada u omita partes. Use exactamente las partes de repuesto indicadas en la configuración, como lo especifica el fabricante.
 - O** - Consulte las instrucciones del usuario y/o los manuales de mantenimiento para obtener la información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
 - P** - NIOSH no evalúa los respiradores como mascarillas para uso quirúrgico.
 - S** - Instrucciones especiales o críticas de utilización y/o limitaciones de utilización específicas se aplican.
- Favor de referirse a las instrucciones antes de su utilización.